



Flexineb™ Pojemnik do nebulizacji

Zasady mycia pojemnika do nebulizacji

- Wydajność nebulizacji i żywotność pojemnika do nebulizacji zależy od użytych leków i utrzymania w czystości pomiędzy kolejnymi zastosowaniami.
- W celu osiągnięcia najlepszych efektów ważne jest, aby stosować do czyszczenia pojemnika do nebulizacji dostarczany przez Nortev STERI-7™ roztwór czyszczący, który został specjalnie opracowany dla ochrony elementu generującego ultradźwięki.
- Zapoznaj się z instrukcją użycia Nortev STERI-7™ roztworu czyszczącego
- Użycie innych środków do dezynfekcji i innego stężenia STERI-7™ może uszkodzić element generujący ultradźwięki w pojemniku do nebulizacji i zmniejszyć czas pracy tego pojemnika.
- Nie zanurzać pojemnika do nebulizacji w wodzie ani żadnym innym płynie.

Części zamienne:

W celu niezaburzonej kontynuacji zleconej terapii zaleca się posiadanie dodatkowego pojemnika do nebulizacji na wypadek uszkodzenia.

Zapasowy pojemnik do nebulizacji jest dostępny u dystrybutora.

Inovpol sp. z o.o. ul. Poprzeczna 24, 43-190 Mikołów

www.inovpol.pl; email: biuro@inovpol.pl; tel.: +48 509710111.