

Instrukcja użycia Pain-Away®

- Pain-Away® jest stymulatorem o niskiej częstotliwości (1-2 Hz) sterowanym przez generator kwarcowy.
- Jego skuteczność oparta jest na technice przezskórnej elektrostymulacji nerwów, zwanej TENS (ang. „Transcutaneous electrical nerve stimulation”), używanej w leczeniu przewlekłego i ostrego bólu, powstałego w wyniku drobnych urazów.
- Przy każdym umieszczeniu urządzenia w miejscu bólu i/lub w punkcie akupunkturowym i wciśnięciu przycisku, niewielki impuls elektryczny zostaje wysłany do mózgu przez przekaźniki nerwowe. Na ten impuls mózg odpowiada wydzielaniem endorfin (naturalnej obrony organizmu przed bólem).
- Pain-Away® jest urządzeniem w 100% naturalnym. Nie wykazuje żadnych działań niepożądanych i nie koliduje z innymi metodami leczenia.

Jak używać (tylko do użytku zewnętrznego)

- Trzymaj Pain-Away® w miejscu bólu i wciśnij przycisk 30-40 razy. Poczujesz mały impuls elektryczny.
- W razie potrzeby powtórz czynność – nie ma ryzyka przedawkowania.
- Urządzenie działa w promieniu 10 cm i jest skuteczne również przez lekkie ubranie.

Kiedy stosować Pain-Away®

- Działanie Pain-Away® opiera się na przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS).
- TENS niweluje przewlekły i ostry ból mięśni, pleców, barków, rąk, nóg, głowy oraz migrenę, a także urazy sportowe i rwę kulszową.
- Metoda ta od wielu lat z powodzeniem stosowana jest w szpitalach i klinikach na całym świecie.

Kiedy nie stosować Pain-Away®

- u osób z rozrusznikiem serca
- w pierwszych 16 tygodniach ciąży
- w okolicach oczu
- na mokrą skórę
- w pobliżu łatwopalnych substancji oraz źródeł tlenu
- bezpośrednio na metalowe implanty
- u osób chorych na padaczkę
- na otwarte rany
- na aortę, mięśnie krtani i gardła
- bezpośrednio na mięsień sercowy
- podczas jazdy samochodem

Uwagi

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki.

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Instrukcja nie zastępuje zleconego przez lekarza leczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stosowania leków, takich jak sterydy lub warfaryna, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- U dzieci poniżej 10 roku życia stosować tylko pod nadzorem osób dorosłych.


Konserwacja urządzenia

- Stosować miękki, lekko wilgotny materiał.


INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU

Nieinwazyjna akupunktura


- Badania wykazały, że urządzenia stymulujące, takie jak Pain-Away®, mogą być używane do nieinwazyjnej akupunktury.
- Aby dowiedzieć się, w jakich przypadkach można zastosować ten rodzaj leczenia i znaleźć odpowiednie punkty akupunkturowe, przeczytaj instrukcję.
- W każdym punkcie wykonaj 20-25 kliknięć.
- Sugerowane punkty akupunkturowe przedstawione są w dalszej części instrukcji.
 - Ból mięśni
 - Ból pleców
 - Migrena
 - Łokieć tenisisty
 - Ból barków
 - Ból nóg
 - Ból spowodowany skurczami mięśni
 - Rwa kulszowa
 - Ból rąk
 - Ból głowy
 - Ból spowodowany urazem szyjnym
 - Lumbago

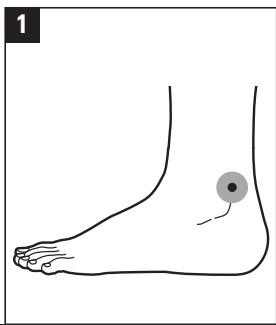


• Ból mięśni

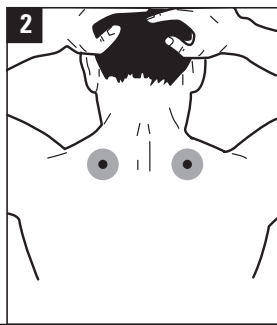


• Ból barków

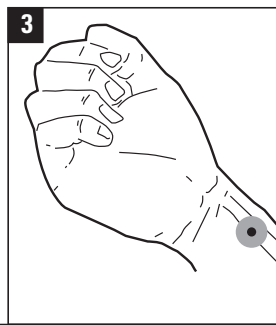


• Ból rąk

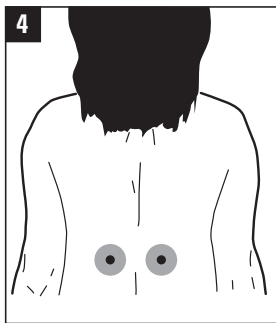


• Ból pleców

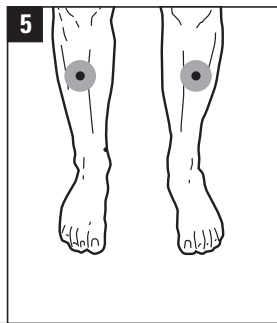


• Ból nóg

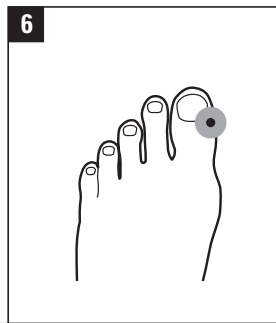


• Ból głowy

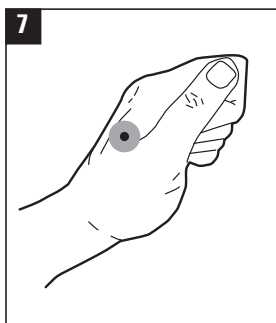


• Migrena

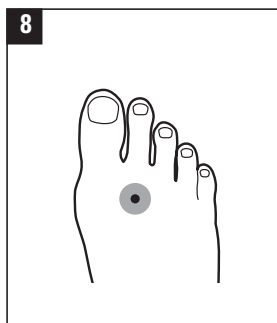


• Ból spowodowany skurczami mięśni

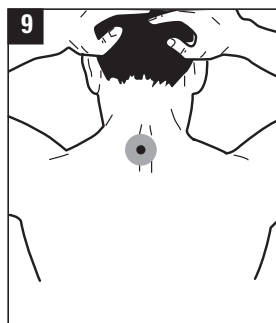


• Ból spowodowany urazem szyjnym

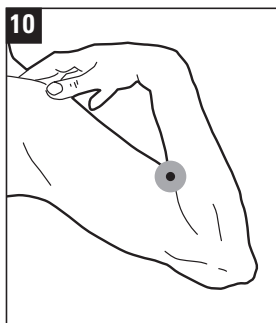

• Łokieć tenisisty

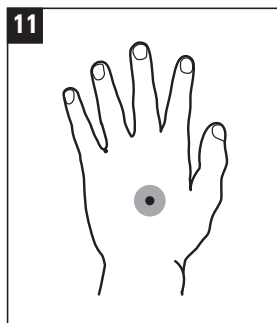

• Rwa kulszowa

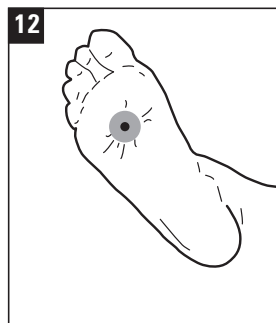

• Lumbago

Informacja techniczna:

Nazwa: podręczny stymulator piezoelektryczny

Klasyfikacja: klasa IIa wyrobu medycznego

Wymiary: długość 130 mm, średnica 22 mm

Wydajność energetyczna: 2,6 mJ na 2000

Temperatura używania: 0 °C do 40 °C, wilgotność względna <90%

Temperatura przechowywania: -20 °C do +50 °C

Konserwacja urządzenia: stosuj miękki, lekko wilgotny materiał

Przećnięty okres przydatności produktu: 2-3 lata

Urządzenie zgodne z Europejską Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42 EEC

Gwarancja: 2 lata, realizowana przez sprzedawcę

Produkcja: Włochy (Italy)

Tylko do użytku zewnętrznego

Wytwórca: AXEL s.r.l. - Via F. Matteucci, 11, 50041 Calenzano (FI) Italy

Dystrybutor: Reagreen System, ul. Tysiąclecia 78/9, 40-871 Katowice

Stan na dzień 02.2010

PAIN·AWAY®
ACUPUNCTURE·PEN

 **axel**



MADE IN ITALY

Energy-output
2.6mJ at 2000Ω

